


GUIDA UTILIZZO ORTHANC VIEWER

Il presente documento spiega in modo semplice l'utilizzo del software di visualizzazione delle immagini diagnostiche ORTHANC VIEWER. Il visualizzatore, come riportato in alto non **DEVE ESSERE UTILIZZATO** per diagnosi.


All'apertura dell'applicazione viene presentato un popup che identifica la versione.

Per accedere all'applicazione cliccare sul pulsante "Close"

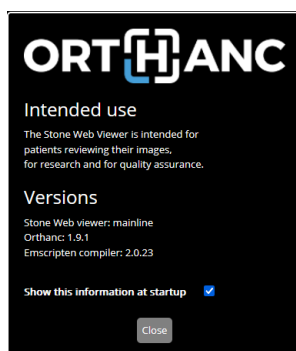

La pagina principale dell'applicazione può essere suddivisa in tre zone principali:

- Il menù di navigazione a sinistra (1)
- Il menù degli strumenti in alto a destra (2)
- La zona di visualizzazione al centro. (3)

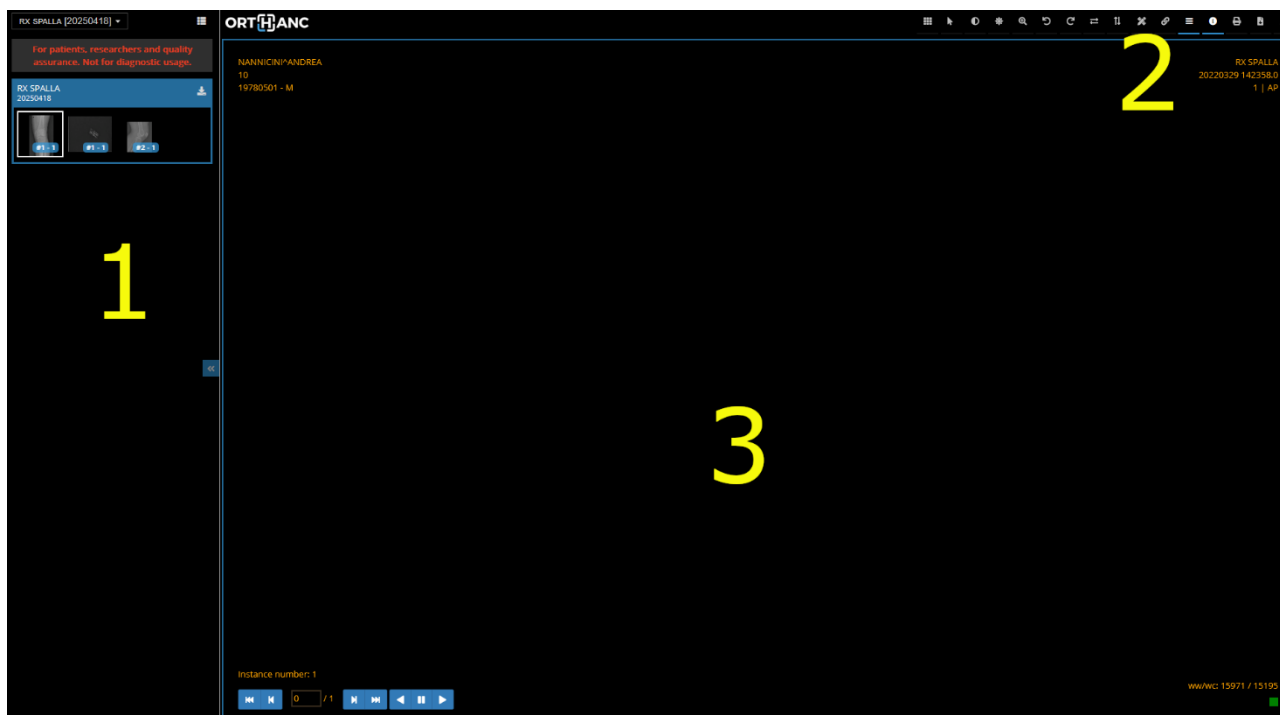


1. VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI

Per visualizzare le singole immagini o le serie è necessario cliccare sulla singola immagine o serie presente nel menù in alto a sinistra.



E' possibile interagire con l'immagine stessa utilizzando i diversi strumenti disponibili nella parte superiore destra della finestra (2) per esaltare alcuni particolari

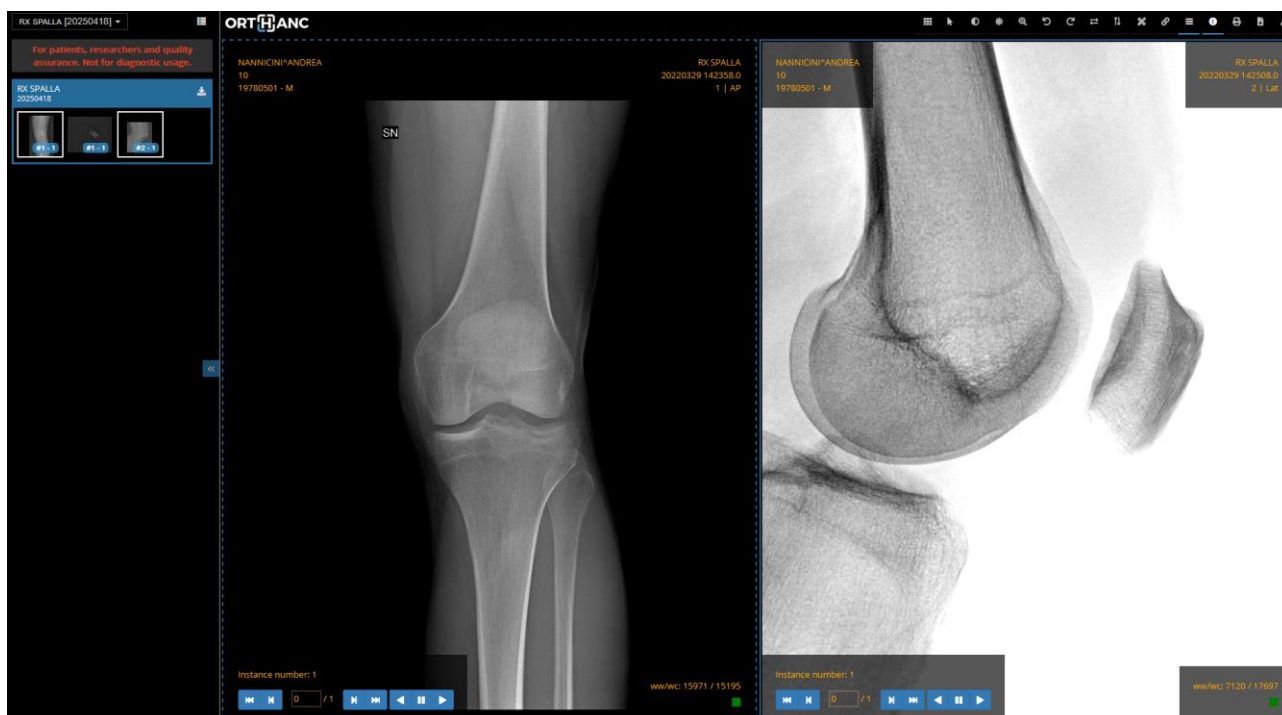

2. DOWNLOAD STUDIO COMPLETO

Una volta eseguito l'accesso all'applicazione, per poter scaricare lo studio sul device locale è necessario cliccare sull'icona presente nel menù in alto a sinistra dove è riportato la descrizione dello studio.



E' necessario attendere alcuni secondi prima che lo studio venga scaricato.

Per studi di RMN e TC è necessario attendere alcuni minuti per l'elevata grandezza dei dati.

In modo automatico verrà scaricato un file denominato **archive.zip** che può essere recuperato nella cartella predefinita per il download dei file.

Il file **archive.zip** è un file compresso contenente tutte le immagini dello studio nello standard **DICOM**.

Si ricorda che lo studio, una volta scaricato può essere visualizzato **solo con altri applicativi compatibili con lo standard DICOM**. In caso di necessità è possibile eseguire il download delle singole immagini in formati compatibili con tutti i sistemi come descritto al punto 3.

Il file archive.zip può essere copiato su una memoria di massa e trasportata con facilità.

Per l'invio in posta elettronica dello studio verificare la grandezza del file archive.zip e la massima grandezza del file allegabile alla singola email. Questa informazione è reperibile dal gestore della propria casella email.

In caso il file archive.zip sia più grande della massima capacità della propria email non sarà possibile inviarlo tramite posta elettronica.

3. DOWNLOAD SINGOLA IMMAGINE JPEG

In caso di necessità è possibile scaricare le singole immagini in formato compatibile Jpg/Jpeg cliccando sull'apposita icona



presente nel menù in alto a destra una volta selezionata l'immagine come descritto al punto 1.

Il file creato può essere recuperato nella cartella di download predefinita che si chiamerà **StoneWebViewerScreenshot.jpg**

Le immagini in formato jpg sono compatibili con tutti i sistemi digitali presenti.
